

DHB 250-N / DHB-R 250-N

Duschhocker XL



Modell DHB-R 250-N



Modell DHB 250-N

Gebrauchsanweisung



Leben in Bewegung

Version 1.0 | 12.2021

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses!

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Duschhockers. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Modell	Art. Nr.
Duschhocker XL DHB 250-N	11000061
Duschhocker XL DHB-R 250-N	11000062

Lieferumfang

- 1 x Verpackung - / Transportkarton
- 1 x Duschhocker (mit Rückenlehne beim Modell DHB-R 250-N)
- 4 x Hockerbeine (höhenverstellbar)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Die Teile werden in einem Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Duschhocker unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Das Produkt darf nur auf einem festen ebenen Grund verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass der Duschhocker stets fest und sicher auf allen vier Füßen steht.
- Überprüfen Sie, dass sich alle Hockerbeine auf gleicher Länge befinden.
- Besondere Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, besonders dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Zusammenbau, dass die Stabilität Ihres Duschhockers gegeben ist.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen vergrößert werden.
- Nicht auf das Produkt stellen, nicht als Stehhilfe verwenden!
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Nicht ausgewiesenes Zubehör darf nicht verwendet werden. Wir übernehmen keine Haftung für das Anbringen oder Verwenden von Fremdprodukten.
- Falls Sie sich selbst nicht ausreichend halten können, bitten Sie eine Hilfsperson um Unterstützung.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, indem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktbeschreibung

- Höhenverstellbar
- Rutschsichere Füße
- Stabiles, leichtes Aluminiumgestell
- Rostfrei
- Eingearbeitete Haltegriffe
- rutschfeste Sitzoberfläche mit Wasserablauföffnungen


DHB-R 250-N



DHB 250-N



Produktaufkleber

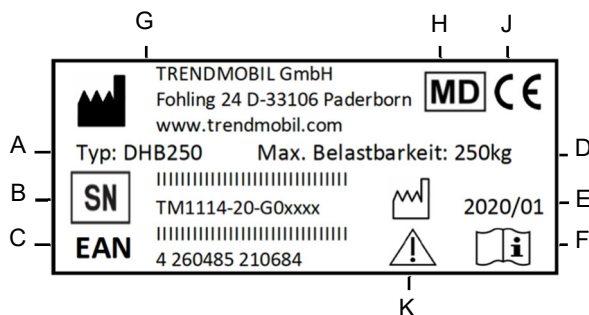

- A – Typ/Modellname
- B – Seriennummer
- C – EAN Identifikation
- D – Max. Belastbarkeit
- E – Herstellungsdatum Jahr/Monat
- F – Bedienungsanleitung beachten
- G – Herstellerangabe
- H – Medizinprodukt
- J – CE-Kennzeichen
- K – Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten



Der Produktaufkleber ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Er darf nicht entfernt werden. Sollte der Produktaufkleber unlesbar werden oder verloren gegangen sein, muss er ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Zweckbestimmung

Der Duschhocker bietet den bewegungseingeschränkten schwergewichtigen Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit eine Sitzmöglichkeit im Bereich der Dusche. Die ergonomisch optimal eingearbeiteten Haltegriffe bieten den zusätzlichen Halt und sicheres Aufstehen. Beim Modell DHB-R 250-N sorgt zusätzlich die Rückenlehne für ein komfortables und sicheres Sitzen.

Indikation

Die Verwendung des Duschhockers ist angezeigt bei:

- Standunsicherheiten oder Stehunsfähigkeit
- Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten
- Rumpfhaltungsschwäche, so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch möglich ist

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschhockers ist nicht angezeigt bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

Technische Daten

Duschhocker	DHB 250-N	DHB-R 250-N
Max. Belastbarkeit (kg)	250	250
Gewicht (kg)	3,0	3,5
Gesamtbreite (cm)	67	67
Sitztiefe (cm)	41	41
Rückenhöhe (cm)	-	43
Sitzbreite (cm)	56	61
Sitzhöhe (cm)	44-53	44-53
Farbe	weiß	
Material	Aluminiumrohr, lackiert Sitzfläche und Rückenlehne aus ABS	

Individuelle Anpassungen

Höhenverstellung der Hockerbeine

Die Sitzhöhe kann durch Höhenverstellung der Hockerbeine dem Nutzer individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu den Federknopf am Hockerbein in das Teleskoprohr. Schieben Sie nun das Rohr in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf nach der Verstellung wieder in eine der vorhandenen Bohrungen hörbar einrastet.

Sturzgefahr! Überprüfen Sie, ob alle Hockerbeine auf der gleichen Höhe eingestellt sind.



Montage der Rückenlehne (Modell DHB-R 250-N)

Die Rückenlehne ist vormontiert. Fügen Sie dazu die Rückenrohre zusammen und ziehen die Feststellschrauben an.





Reinigung / Desinfektion

Der Duschhocker sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Dieser kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung!

Wiedereinsatz

Der Duschhocker ist für den Wiedereinsatz konzipiert.

Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben.

Der Duschhocker muss vor der Weitergabe gereinigt, desinfiziert, gewartet und vom Fachhandel freigegeben werden.

Wartung

Vor jeder Verwendung soll das Produkt auf Schäden überprüft werden. Es soll sichergestellt werden, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Lose Schrauben und Muttern müssen wieder fest angezogen werden.

Sollte der Duschhocker defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Produktlebensdauer

Wir gehen von einer Produktlebensdauer von **fünf Jahren** aus. Voraussetzung ist, dass das Produkt unter Beachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben in der Gebrauchsanweisung bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen **24 Monaten** ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produktes und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Händler.

Ihr Fachhändler:



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn Deutschland
Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0
Telefax: +49 (0) 5254-9479-299
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com