



Bedienungsanleitung trio Gehwagen

Art.-Nr. 2050.1 / HMV-Nr. 10.46.02.1014

Art.-Nr. 2055.1 / HMV-Nr. 10.46.02.1010

Art.-Nr. 2045.1 / HMV-Nr. 10.46.02.1015

Art.-Nr. 2040.1 / HMV-Nr. 10.46.02.1011



Sehr geehrter Nutzer!

Mit dem Trio Gehwagen haben Sie eine gute Wahl getroffen. Er wird Ihnen helfen, den Alltag oder die Geh-Therapie zu meistern. Sie können den Gehwagen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwenden.

Die Bedienung Ihres Trio Gehwagens ist denkbar einfach und unkompliziert. Die Höhe und Breite können Sie ohne Werkzeug anpassen. Sollten Sie zusätzliche Fragen zu dem Trio Gehwagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhandel oder direkt an uns.

Indikationen

Gehwagen unterstützen gehbehinderte Menschen, indem sie die Belastung der unteren Extremitäten mindern. Bei der Benutzung des Gehwagens ist eigene Kräfteanwendung des Benutzers sowie ein Grund-Stehvermögen erforderlich. Er ermöglicht ein entlastendes, sicheres Gehtraining bei Krankheitszuständen oder Verletzungsfolgen mit Störung des Gehapparates und / oder gleichzeitiger Koordinations- / Gleichgewichtsstörung.

Garantie / Wiedereinsatz

Thomashilfen gewährt 24 Monate Garantie auf Verarbeitung und Material des Gehwagens. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung sowie natürlichen Verschleiß entstehen.

Thomashilfen bevorratet auch nach Auslauf des Modelles ausreichend Ersatzteile. Ein Teilaustausch, z.B. für den Wiedereinsatz, ist damit langfristig gewährleistet.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Benutzung des Gehwagens von bewegungseingeschränkten Personen muss immer unter Aufsicht eines Betreuers erfolgen, um Stürze zu vermeiden!
- Vor Gebrauch müssen regelmäßig die Schraubverbindungen, insbesondere die der Höhenverstellung, überprüft und ggf. nachgezogen werden!
- Bitte seien Sie beim Überwinden von kleinen Hindernissen, wie z.B. Türschwellen, besonders vorsichtig. Hier besteht immer Kippgefahr! Fahren Sie bitte niemals rückwärts über solche Hindernisse!
- Achten Sie sorgsam darauf, dass stets der ganze Unterarm aufgestützt ist bzw. Sie sich ausreichend auf den Achselstützen (optional) abstützen.
- Halten Sie sich immer an den vorderen Handgriffen fest.
- Fahren Sie nur auf ebenen Untergründen.
- Achtung! Beim Verstellen der Armauflagen und Achselstützen besteht Klemmgefahr.
- Achtung! Die Armauflagen können bei längerer direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Es besteht Verletzungsgefahr bei direktem Hautkontakt.

Wartung und Pflege

- Bitte benutzen Sie zur Reinigung des Trio Gehwagens keine scheuernden aggressiven, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, sondern nur kunststoff- und lackgeeignete Haushaltsreiniger.
- Der Gehwagen muss einmal jährlich durch Fachpersonal auf mögliche Fehler / Beschädigungen / einwandfreie Funktion geprüft werden.

Einstellen der Handgriffe

Transportbedingt befinden sich die Handgriffe an der Unterseite des Gehwagenoberteils in gedrehter Position. Um sie richtig zu positionieren, lösen Sie bitte die Schraube und drehen Sie die Handgriffe so, dass sie nach oben zeigen (Abb. 1). Nach Möglichkeit sollte der 90°-Winkel zwischen Handgriff und Armauflage (sowohl senkrecht als auch waagrecht) eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass das Raster ineinander liegt.



Abb. 1

Höheneinstellung der Armauflage

Durch das Lösen der beiden Spannschrauben rechts und links (Abb. 2), wird die Höhe der Armauflage eingestellt. Die optimale Höhe ist erreicht, wenn die Arme des Benutzers rechtwinklig gebeugt auf der Armauflage liegen.



Abb. 2

Achtung:

Nach dem Einstellen die Spannhelpe wieder fest anziehen! Vermeiden Sie Beschädigungen durch zu festes Anziehen – 10 Nm (handfest) sind ausreichend! Beachten Sie die max. Auszugslänge (Markierung am Rohr)!

Einstellen der Bremse

Die Bremswirkung kann durch Spannen der Bremskabel an der Handbremse fein justiert werden. Dreht man den Kabelspanner nach rechts wird die Bremswirkung verkleinert (Abb. 3)

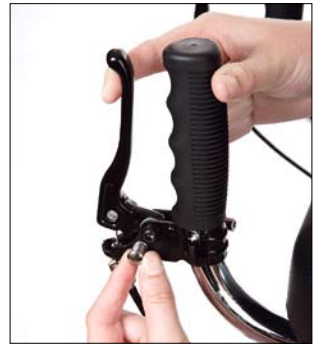


Abb. 3

Zusätzlich lässt sich die Bremse auch am Ende des Bremskabels (Abb. 4) durch Drehen der Kabelspanner dort einstellen.



Abb. 4

Achtung:

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass das Rad bei gelöster Bremse gerade noch frei drehen kann. Zu viel Raum zwischen Rad und Bremse reduziert die Bremswirkung!

Sichern Sie beim Ein- und Aussteigen den Trio Gehwagen gegen Wegrollen! Hierzu können Sie die Bremse durch Eindrücken des Druckknopfes an der Handbremse fest arretieren. Die Arretierung wird durch leichtes Ziehen am Bremsarm der Handbremse wieder gelöst.

Breitenverstellung

Sofern Sie über ein Modell mit Breitenverstellung verfügen, können Sie die Position der Armauflagen ändern. Lösen Sie dazu die Schrauben unter den Armauflagen (Abb. 5). Ziehen Sie die Schrauben anschließend wieder fest an.



Abb. 5

Anbringen der Achselstützen (optional)

Entfernen Sie die Kunststoff-Verschlussstopfen aus dem Rahmen der Armauflage. Schieben Sie nun den Metallaufnahmeblock durch die dafür vorgesehen Löcher bis zum Ende durch (Abb. 6) und befestigen Sie den Block mit den beiliegenden Schrauben. Danach führen Sie das linke / rechte Rohr der Achselstütze durch den Aufnahmeblock, so dass das Achselpolster oben ist (Abb. 7).



Abb. 6

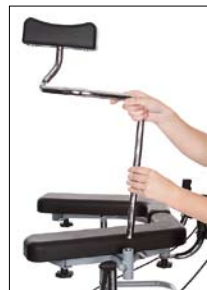


Abb. 7

Korrekte Höheneinstellung der Achselstütze (optional)

Nachdem die Armauflage richtig eingestellt wurde, werden die Achselstützen ausgerichtet. Das gepolsterte Oberteil der Achselstütze soll so hoch sein, dass der Nutzer des Gehwagens gut gestützt wird. Dazu muss sich Der Benutzer gerade und entspannt hinstellen. Dann löst man die Spannhebel (Abb. 8) und reguliert die Höhe so, dass sich die Stützen in der Achselhöhle befinden.



Tipp:

Die erforderliche Grundhöhe erreichen Sie über die Höhenverstellung der Armauflage. Die Feineinstellung erfolgt dann über die Achselstützenhöhenverstellung.

Achtung:

Nach dem Einstellen die Spannhebel wieder fest anziehen! Vermeiden Sie Beschädigungen durch zu festes Anziehen – 10 Nm (handfest) sind ausreichend! Beachten Sie die max. Auszugslänge (Einkerbung am Rohr)!



Abb. 8

Technische Daten:

max. Belastbarkeit:	150 kg
max. Höhenverstellung der Armauflagen:	90 - 130 cm
max. hintere Breitenverstellung der Armauflagen:	40 - 53 cm
Breite:	71 cm (bis max. 77 cm)
Gesamtlänge:	90 cm
max. Wendekreisbreite:	120 cm

Geprüft nach DIN EN ISO 11199-3:2005

Serien-Nr.: Die Codierung wird laufend fort nummeriert und beim Hersteller hinterlegt. Anhand der Serien-Nr. ist ein Rückschluss auf Herstellmonat und -jahr möglich.


Thomashilfen

Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Tel. 047 61 / 88 60 · www.thomashilfen.de · info@thomashilfen.de

