

Haltegriffe sicher kleben – ohne Bohren



REF

1301121 Glubeli Power S
1301122 Glubeli Power M
1301123 Glubeli Power L



REF

1302121 Glubeli Power S W
1302122 Glubeli Power M W
1302123 Glubeli Power L W



REF

1303121 Glubeli Power S B
1303122 Glubeli Power M B
1303123 Glubeli Power L B

DE

**Gebrauchsanweisung
Glubeli Power Haltegriffe zum Kleben**



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	2
1.1 Haftungsbeschränkung	2
1.2 Erklärungen/Symbole in der Gebrauchsanweisung und auf dem Griff	3
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.4 Indikationen	3
1.5 Kontraindikationen	3
1.6 Einsatzbereich des Produktes	3
1.7 Zu Ihrer Information	4
1.8 Nutzungsdauer	4
1.9 Wiedereinsatz	4
2. Sicherheitsinformationen	4
3. Montage des Klebgriffs	5
3.1 Reinigen der zu beklebenden Fläche	5
3.2 Anbringen der Klebevorrichtung	5
3.3 Vorbereiten der Griffstangenträger	5
3.4 Mischen und Auftragen des Klebers	5
3.5 Montage von Griffstangenträger und Griffstange	6
3.6 Demontage von Griffstange und Griffstangenträger	6
4. Technische Daten	6
4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt	6
4.2 Technische Daten	7
4.3 Klebung auf Fugen vermeiden	7
4.4 Materialien	7
5. Instandhaltung	8
5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)	8
5.2 Instandhaltung (Wartung)	8
6. Störungen erkennen und beheben	8
7. Entsorgung	8
8. Bilder zur Montage	9
9. Lieferumfang:	12

1. Allgemein

Lesen Sie unbedingt vor der Montage und Benutzung diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise um Ihre Sicherheit bei der Benutzung des Haltegriffes zu gewährleisten. Diese Gebrauchsanweisung für späteres Nachlesen aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!



1.1 Haftungsbeschränkung

Die ROTH GmbH übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden aufgrund von:

- Nichtbeachtung, der in der Gebrauchsanweisung genannten Warn- und Sicherheitshinweise
- Unsachgemäße Montage, Anwendung oder Reinigung

Sollte im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegender Vorfall auftreten ist dieser dem Hersteller und der zuständigen Behörde des entsprechenden Landes zu melden.

1.2 Erklärungen/Symbole in der Gebrauchsanweisung und auf dem Griff

	Gebrauchsanweisung muss gelesen werden! (ISO 7010; M002)
	Für Personen mit einer Sehschwäche; kann im Internet für diese Gebrauchsanweisung unter https://www.mobeli.de/download-bereich die Schriftgröße entsprechend eingestellt werden.
	24 Stunden-Frist beachten!
	Warnhinweise (Weisen auf eine gefährliche Situation hin)
	Hersteller (zusätzlich auf der Griffstange Herstellungsjahr – Monat)
	Bestellnummer
	Maximales Benutzergewicht
	Die Glubeli Power Haltegriffe sind konform mit der Verordnung (EU) 2017/745
	Die Glubeli Power Haltegriffe sind Medizinprodukte der Klasse I
	Chargenbezeichnung
	Eindeutige Produktidentifizierung (Unique Device Identification)

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Als Haltegriff oder Aufstehgriff für Erwachsene und Kinder, die bei eingeschränkter Mobilität eine Unterstützung für z.B. einen sicheren Stand oder Transfer benötigen. Die Haltegriffe sind entwickelt, um natürliche Bewegungen von Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu unterstützen. Sie sind nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen.



Jede weitere Verwendung, z.B. als Sitz, Tragegriff oder als Steighilfe ist nicht erlaubt. Ebenso dürfen keine Sitze eingehängt werden.

1.4 Indikationen

Unterstützung beim Aufstehen oder Hinsetzen; Stabilisierung z.B. beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne; Reduzierung von Sturzrisiken z.B. im Bereich von Bad, Dusche oder Toilette; um soziale Teilhabe zu sichern oder zu verbessern und zur Erhöhung von Selbstständigkeit und Lebensqualität für Personen mit: eingeschränkter Mobilität, Gleichgewichtsproblemen, muskulärer Schwäche (leichter bis moderater Ausprägung), postoperativem Rehabilitationsbedarf, Fähigkeitsstörungen.

1.5 Kontraindikationen



Personen, deren Körpergewicht das in der Produktbeschreibung angegebene maximale Benutzergewicht überschreiten. Montage auf nicht festen oder nicht haftfähigen Oberflächen, bei denen keine dauerhaft sichere Befestigung gewährleistet werden kann. (z. B. Fliesen mit Lotuseffekt oder Nanobeschichtung)

1.6 Einsatzbereich des Produktes

Die Anbringung der Haltegriffe ist sowohl auf offenporigen, als auch auf porendichten Oberflächen möglich. Der Untergrund muss solide und tragfähige Eigenschaften aufweisen, die vor Anbringung des Haltegriffes geprüft werden müssen. Der Untergrund kann dabei mit folgenden Materialien beschaffen sein: Fliesen (keine Mosaikfliesen), Naturstein, Spiegel, Glas oder Alu-eloxiert, Alu-blank, Stahl, massives unbehandeltes Holz. (Achtung: über gestrichene Untergründe kann keine Aussage getroffen werden da die Haftung auf dem Material nicht vorhergesehen werden kann!) Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE. Der Haltegriff findet Anwendungen, wo gebohrte Griffe nicht montiert werden können, z.B. in der Glasdusche. Wenn das Anbohren der Wände nicht erlaubt (nicht möglich) ist, z.B. in einer Mietwohnung, oder wenn sich Wasser- und/oder Stromleitungen in der Wand befinden können. Der Haltegriff findet dort seine Anwendung, wo mobile Haltegriffe von MOBELI aufgrund von offenporigen Oberflächen nicht angebracht werden können. Jedoch kann ein mobiler Haltegriff von MOBELI dazu verwendet werden, um die korrekte Position des Haltegriffes zu ermitteln, d.h. vor dem Montagevorgang könnte damit die Griffposition optimal bestimmt und getestet werden.

1.7 Zu Ihrer Information

Laut Fliesenkleber-Stoffnorm DIN EN 12004 ist für Fliesenkleber eine Mindesthaltekraft von 0,5 N/mm² vorgeschrieben. Bei z.B. zwei Fliesen mit 147 mm x 147 mm Fliesengröße x 0,05 kg/mm² würde dies eine Haltekraft von ca. 2160 kg ergeben. Selbst bei einer Klebefläche von 1/3 der Fliesenfläche (durch z.B. grobe Zahnpachtel) und nicht ausgefugter Fliesenfläche besteht noch eine Haltekraft von ca. 700 kg.

Da die erforderliche Haltekraft nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann, muss die Tragfähigkeit der jeweiligen Fliesen oder anderer Wandoberflächen vor der Anwendung vor dem ersten Gebrauch überprüft werden. Aufgrund von Werkstoffalterung oder bei Trockenbaukonstruktionen können reduzierte Haltekräfte auftreten. Daher ist vor der ersten Benutzung eine Funktionsprüfung durchzuführen, beispielsweise durch ruckartiges Belasten aus sicherem Stand oder Sitz, vorzugsweise unter Aufsicht einer Hilfsperson.

1.8 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt (bei täglicher und bestimmungsgemäßer Verwendung) in einer Institution sechs Jahre. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren. Die Griffe sind nach ISO 17966:2016 für Institutionen mit 10 Einsätzen pro Tag geprüft. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 2 Jahre.

1.9 Wiedereinsatz

Das Produkt ist grundsätzlich für den dauerhaften Gebrauch entwickelt und geeignet.

Achtung! Durch UV-Strahlung kann sich die umliegende Stelle der Oberfläche neben dem aufgeklebten Griffstangenträger verfärben. Dadurch können nach der Demontage Farbunterschiede auftreten.

Der Haltegriff kann ohne Kleberückstände demontiert und anschließend wieder neu und ohne Schäden befestigt werden. Dazu bitte ein neues Klebe-Set bei Ihrem Händler beziehen. Die Beachtung des Kapitels „Entfernung/Demontage des Haltegriffs“ muss beachtet werden, siehe Punkt 3.6. Wie oft das Produkt erneut eingesetzt werden kann, hängt von der Art der Verwendung ab. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor dem erneuten Anbringen an der Wand gründlich und überprüfen Sie den Griff sorgfältig.

2. Sicherheitsinformationen



- **Vor der Montage** des Glubeli Power Haltegriffs müssen die Sicherheitshinweise vollständig gelesen, verstanden und strikt beachtet werden.
- **Absolute Sauberkeit:** Die zu beklebende Oberfläche muss vollständig sauber sein. Es dürfen sich keine sichtbaren Schlieren, kein Staub sowie keine losen oder sich lösenden Partikel auf der Fläche befinden.
- **Beschichtete Oberflächen:** Vorab muss abgeklärt werden, ob die zu beklebende Oberfläche mit Lack, einer Nanobeschichtung oder einer Antihaftbeschichtung behandelt wurde. **Auf solchen Oberflächen ist das Ankleben verboten!**
- **Tragfähigkeit des Untergrundes:** Wird eine Fliese, ein Stein oder eine beklebbare Beplankung als Träger des Haltegriffs verwendet, muss sichergestellt sein, dass diese fest mit der Wand verbunden und ausreichend tragfähig ist.
Können Sie dies nicht selbst beurteilen, muss die Prüfung durch eine fachkundige Person erfolgen.
- **Belastbarkeit:** Beachten Sie unbedingt das max. Benutzergewicht des Glubeli Power Haltegriffs gemäß Produktbeschreibung. Eine Überlastung kann zum Versagen der Klebeverbindung führen.
- **Verarbeitungstemperatur:** Die Verarbeitung darf nur bei Temperaturen zwischen **+5 °C und +40 °C** erfolgen. Extrem abweichende Temperaturen können die Klebekraft erheblich beeinträchtigen.
- **Lagerung des Klebers:** Der Kleber ist kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost zu lagern. Die Mindesthaltbarkeit beträgt **2 Jahre**. Verwenden Sie keinen abgelaufenen Kleber – bestellen Sie in diesem Fall bitte ein neues Klebe-Set.
- **Persönliche Schutzausrüstung:** Tragen Sie bei der Anwendung des Klebers stets **Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille**, um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs.
- **Verarbeitungszeit:** Die Verarbeitungszeit des Klebers beträgt bei **23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 10 Minuten**.
- Weitere Sicherheitshinweise: Zusätzliche Sicherheitsinformationen und Empfehlungen (z. B. Sicherheitsdatenblätter) stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
- **Technische Angaben & Haftung:** Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und unseren bisherigen Erfahrungen. Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.
Für spezielle Anwendungsfälle stehen wir gerne beratend zur Verfügung.
Sofern für die Anwendung eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, liegt die Verantwortung für deren Einholung beim Anwender.
- **Achtung:** Durch Sonneneinstrahlung oder durch Kontakt mit heißem Wasser können Temperaturen größer als 41°C erreicht werden, was zu Hautschädigung und/oder Verbrennung bei Kontakt zum Griff führen kann.
- **Wichtiger Hinweis:** **GLUBELI-Produkte dürfen niemals mit Teilen anderer Hersteller kombiniert werden.** In diesem Fall erlöschen sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche. **Unfallgefahr!**



3. Montage des Klebegriffs



(unbedingt die Abbildungen unter Punkt 8, Seite 9 beachten)

Lesen Sie vor Beginn der Montage die Montageanweisung vollständig und sorgfältig durch.

Füllen Sie anschließend und während der Montage die beiliegende **Checkliste** aus.

Sehen Sie sich zudem das Video aufmerksam an. www.mobeli.de/glubelivideo



3.1 Reinigen der zu beklebenden Fläche

(Seite 9 Abb. 1)

Reinigen Sie die betroffenen Oberflächen gründlich, damit diese **sauber** und **fettfrei** ist

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Kalk, Haarspray, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Reinigung mit Isopropanol (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, fusselfreiem Tuch.

Abschließend reinigen Sie die Oberflächen mit dem beiliegenden I.Cleaner-Reinigungstuch.

Es dürfen keine Schlieren, Staub oder sonstige Verschmutzungen vorhanden sein.

Wichtig! Vor dem Ankleben muss die Oberfläche völlig trocken sein.

3.2 Anbringen der Klebevorrichtung

- Legen Sie den Befestigungsplatz für den Griff fest und kennzeichnen Sie diesen oberhalb mit Pfeilen
- Nehmen Sie eine Klebevorrichtung und entfernen Sie die Schutzfolie.
- Klebevorrichtung mit den Nasen in Richtung Schwerkraft unten an die vorgesehene Klebposition anbringen.
- Wiederholung der Schritte b+c mit der 2. Klebevorrichtung an die vorgesehene Klebposition.
ACHTUNG: Tabelle 4.2 Seite 7 Abstand Griffstangenträger C beachten! **Die Montage auf Fliesenfugen sollte möglichst vermieden werden**, dies kann durch Verschieben der Griffstangenträger bis zu 35mm pro Seite erreicht werden. Siehe 4.3 Klebung auf Fugen vermeiden.
- Freie Montageflächen an den Klebevorrichtungen mit I.Cleaner-Reinigungstuch reinigen.



3.3 Vorbereiten der Griffstangenträger

- Nehmen Sie die Griffstangenträger aus der Verpackung.
- Rauen Sie die Klebefläche der Griffstangenträger mit dem mitgelieferten Schleifvlies auf (Seite 9 Abb. 3). Dies entfernt eventuell Oxidation und optimiert die Klebung.
- Reiben Sie die aufgeraute Fläche des Klebehalters mit dem mitgelieferten I.Cleaner-Reinigungstuch ab.
ab. Vor dem Anbringen des Klebers muss die Oberfläche völlig trocken sein (Seite 9 Abb. 4).



3.4 Mischen und Auftragen des Klebers

- Den Folienbeutel unten etwas aufrollen (Seite 9 Abb. 5).
- Den Klebstoff kräftig mit beiden Daumen nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt. Nach Aufplatzen der Trennnaht den Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die Reaktionskammer drücken (Seite 9 Abb. 6+7).
- Den Klebstoff nun innerhalb dieser Kammer mit dem darin befindlichen Reaktionsmittel vermischen. Hierzu die Masse mit beiden Daumen mind. 20x hin und her kneten, dabei keine Ecke auslassen (Seite 9 Abb. 8).
- Schneiden Sie die Verpackung auf und tragen Sie eine erdnussgroße Menge Kleber auf die Klebefläche des Griffstangenträgers auf (Seite 10 Abb. 9).
- Mit dem beiliegenden Spatel den Kleber auf der Fläche verteilen, sodass ein gleichmäßiger Film auf der Klebefläche entsteht und um eine gleichmäßige und zuverlässige Haftung zwischen Kleber und Metall zu gewährleisten. **ACHTUNG: Den Kleber fest andrücken, um Lufteinschlüsse zu vermeiden!** Möglichst nicht über den Rand hinaus verteilen, da dies später entfernt werden muss (Seite 10 Abb. 10).
- Nun ebenfalls eine erdnussgroße Menge Kleber auf die freie Fläche der Klebevorrichtung aufbringen und mit dem Spatel verteilen (Seite 10 Abb. 11+12). Unebenheiten und daraus resultierende Lufteinschlüsse verringern die Klebefläche!



3.5 Montage von Griffstangenträger und Griffstange

- a. Den Griffstangenträger an der unteren Nase der Vorrichtung ca. 5° schräg in die Klebevorrichtung einlegen; den Klebeteller vom Griffstangenträger an die Klebefläche führen (Seite 10 Abb. 13).
- b. Den Griffstangenträger dann parallel an die Klebefläche drücken (Pfeil Seite 10 Abb. 13).
- c. Den Griffstangenträger unten greifen (gerader Pfeil Seite 10 Abb. 14) und unter leichtem Druck zur Klebefläche um 90° nach rechts und dann 90° nach links drehen (Pfeile Seite 10 Abb. 14). Arbeitsschritte 3.4 e+f sowie 3.5 a-c beim zweiten Griffstangenträger und der Klebevorrichtung ebenso mit dem Rest des Klebers ausführen.
- d. **ACHTUNG:** Griffstange erst nach Ablauf von 24 Stunden montieren! Trocknungszeit von 24 Stunden beachten!
- e. Klebevorrichtungen und überstehende Klebereste entfernen.
- f. Der Kugelring ist drehbar gelagert. Achten Sie darauf, dass die Gewindestifte möglichst nach der Montage der Griffstange im weniger sichtbaren Bereich stehen. Diesen im Uhrzeigersinn ca. 10° verdrehen und die Griffstange in den Kugelring einfahren (Seite 11 Abb. 16).
- g. Die Griffstange wieder gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen (Seite 11 Abb. 16).
- h. Die Griffstange in den zweiten Kugelring einschieben (Seite 11 Abb. 17). Achten Sie darauf, dass beide Enden den gleichen Überstand haben (Seite 11 Abb. A+B).
- i. Die Griffstange so montieren, dass das max. Benutzergewicht sichtbar ist (siehe 4.1 Kennzeichnung D auf dem Produkt) und danach durch Festdrehen der Gewindestifte gegen Verrutschen und Verdrehen sichern (Seite 11 Abb. 19).
- j. Vor der ersten Benutzung sollte der Griff von einer Person, welche sicher stehen kann mit dem Körpergewicht durch Ziehen belastet werden.



3.6 Demontage von Griffstange und Griffstangenträger

- a. Gewindestift mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel lösen (Seite 11 Abb. 15).
- b. Griffstange aus dem 1. Kugelring herausziehen
- c. Drehen und aus dem 2. Kugelring herausziehen.
- d. Griffstangenträger und Untergrund z.B. Fliese mit einem Heißluftgerät gut anwärmen bis der Griffstangenträger mit einem Hitzeschutzhandschuh abgenommen werden kann. (Seite 11 Abb. 20) Keinesfalls ohne Schutzhandschuh entfernen. Achtung! Verbrennungsgefahr! Alternativ kann der Griffstangenträger mit einer Spezialspatel (Seite 11 Abb. 21) entfernt werden, welcher über Ihren Fachhändler bezogen werden kann.
- e. Die Kleberückstände mit einem Kunststoffschaber entfernen.
- f. Die Oberfläche mit einem Reinigungstuch gründlich reinigen.
- g. Bei unebenen rauen Oberflächen die Klebereste vorher mit einer Bürste gut entfernen.
- h. Um die Griffstangenträger erneut einsetzen zu können müssen diese sehr gründlich und gut gereinigt werden.
- i. Bestellen Sie für einen neuen Einsatz ein neues Klebe Set. Beachten Sie dabei jedoch die Nutzungsdauer (Punkt 1.8)



4. Technische Daten

4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

(Erklärungen der Symbole siehe Seite 3)

Auf der Griffstangenrückseite (Bilder auf Seite 7 - E)



(01)04250254403XXX

(10) JJJJ-MM UDI



GLUBELI.de

Glubeli Power X

ROTH GmbH D-72213 Altensteig 20XX



130XXXX




XX

Oben auf der Griffstange (D)



max. 130 kg



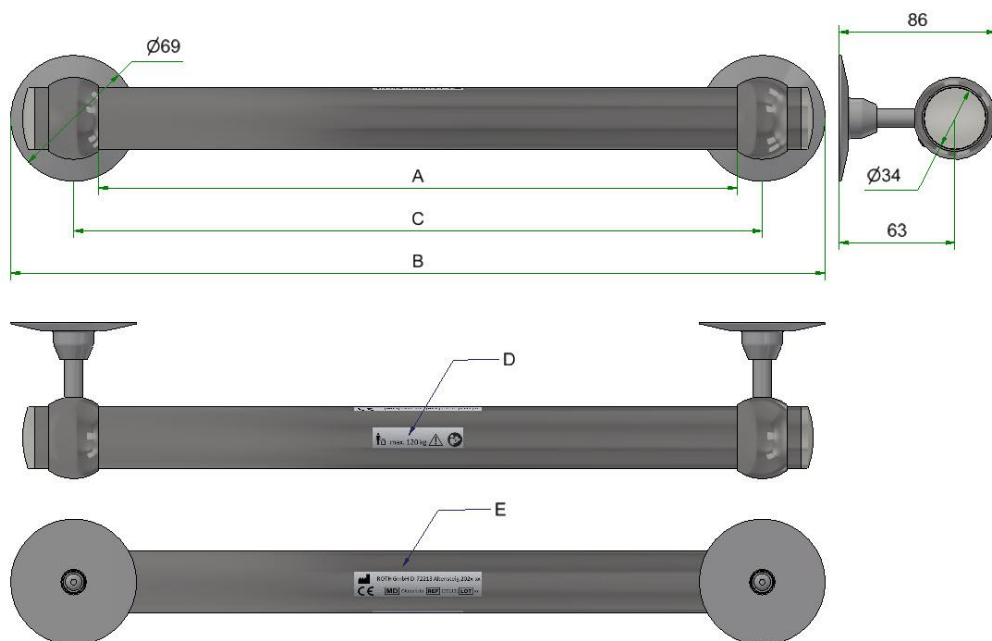

Max. Benutzergewichte der Tabelle „Technische Daten“ und auf der Griffstange unbedingt beachten!


4.2 Technische Daten



Typ zur Best. Nr. siehe Seite 1

REF ROTH Bestell- Nr.	Grifflänge A in mm	Gesamt Länge B in mm	Abstand Griffstangen- träger C in mm	Griff Ø in mm	Max. Benutzer- gewicht in kg	Produkt- gewicht in kg	Material, Farbe
1301121	350	447	377	34	130	1,1	Edelstahl, geschliffen
1301122	600	697	627	34	130	1,5	Edelstahl, geschliffen
1301123	800	897	827	34	130	1,8	Edelstahl, geschliffen
1302121	350	447	377	34	130	1,1	Edelstahl, weiß beschichtet,
1302122	600	697	627	34	130	1,5	Edelstahl, weiß beschichtet,
1302123	800	897	827	34	130	1,8	Edelstahl, weiß beschichtet,
1303121	350	447	377	34	130	1,1	Edelstahl, schwarz beschichtet,
1303122	600	697	627	34	130	1,5	Edelstahl, schwarz beschichtet,
1303123	800	897	827	34	130	1,8	Edelstahl, schwarz beschichtet,

4.3 Klebung auf Fugen vermeiden

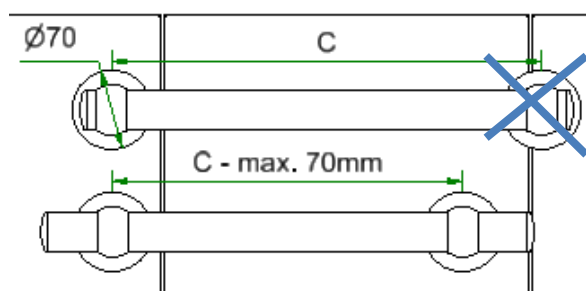

Um das direkte Kleben auf einer Fuge zu vermeiden kann der Griffstangenträger um max. 70mm verschoben geklebt werden. Dabei auf beiden Seiten gleichmäßig die Griffstange max. 35mm verschieben. Dadurch vermindert sich jedoch die Greiflänge A entsprechend.

4.4 Materialien

Alle Griffkomponenten bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Je nach Ausführung sind die Produkte zusätzlich weiß oder schwarz beschichtet.

5. Instandhaltung

5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)

- Starke Verschmutzungen sollten so schnell wie möglich entfernt werden.
- Reinigen Sie die den Haltegriff mit einem Tuch mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln wie Seifenlauge aber verwenden Sie dabei keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner oder Benzin, sowie keine Reinigungsmittel, welche Kunststoffe (Beschichtungen) angreifen.
- Brausen Sie den Haltegriff nach der Benutzung gründlich mit warmem Wasser ab, bis alle Seifen- bzw. Schaumreste entfernt sind. Verbleibende Rückstände können zu Rostbildung an den Edelstahlteilen führen.
- Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle Oberflächen mit einem sauberen Tuch mit Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan) vollständig abwischen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Desinfektionsmittel gemäß den Herstellerangaben angewendet wird
- Beachten Sie in medizinischer Umgebung auch die „Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts www.rki.de.
- Der Haltegriff ist beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenoleder, Pyridinderivat und Thiocyanat.

5.2 Instandhaltung (Wartung)



Prüfen Sie den Griff und die Klebung monatlich auf Beschädigungen oder Lockerungen und benutzen Sie den Griff keinesfalls wenn dieser beschädigt ist!
Zur Funktions- und Festigkeitsprüfung ist der Griff mit ca. 10 kg zu belasten. Der Griff muss fest sitzen und darf sich weder lockern noch bewegen.

6. Störungen erkennen und beheben

Störungen	Mögliche Fehlerursachen/Test	Behebung
Griffstangenträger halten nicht	Mangelhafte Reinigung der zu beklebenden Oberflächen. Oberfläche Griffstangenträger nicht mit Schleifvlies angeraut. Kleber mangelhaft aufgetragen. Verarbeitungszeit größer 10 Minuten nach Anmischen des Klebers. 24h-Frist nicht beachtet; Kleber nicht vollständig getrocknet.	Vollständige Demontage samt Entfernung von Restklebstoff. Anschließend erneute, fachgerechte Montage unter Verwendung eines neuen Klebesets durchführen.
Griffstangenträger halten nicht	Untergrund nicht geeignet. (z.B. Oberfläche nicht stabil, Lotuseffekt, Nanobeschichtung, Anti-Haft-Belag)	Vollständige Demontage samt Entfernung von Restklebstoff. Anschließend erneute, fachgerechte Montage mit neuen Klebe-Set an einem geeigneten Platz vornehmen.
Griffstange lässt sich nicht einschieben	Gewindestifte nicht gelöst	Gewindestifte etwas herausdrehen
Griffstange lässt sich nicht einschieben	Zu beklebende Oberfläche extrem uneben	Komplette Demontage samt Entfernung von Restklebstoff. Anschließend erneute, korrekte Montage mit neuen Klebe-Set an einem geeigneten Platz vornehmen.
Griffstange verdreht sich	Gewindestifte nicht ausreichend fest angezogen.	Gewindestifte anziehen, siehe Punkt 3.5 j








7. Entsorgung







Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmittelverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.









Diese Haltegriffe dürfen nicht in die USA exportiert werden!

Technische Änderungen vorbehalten.

8. Bilder zur Montage

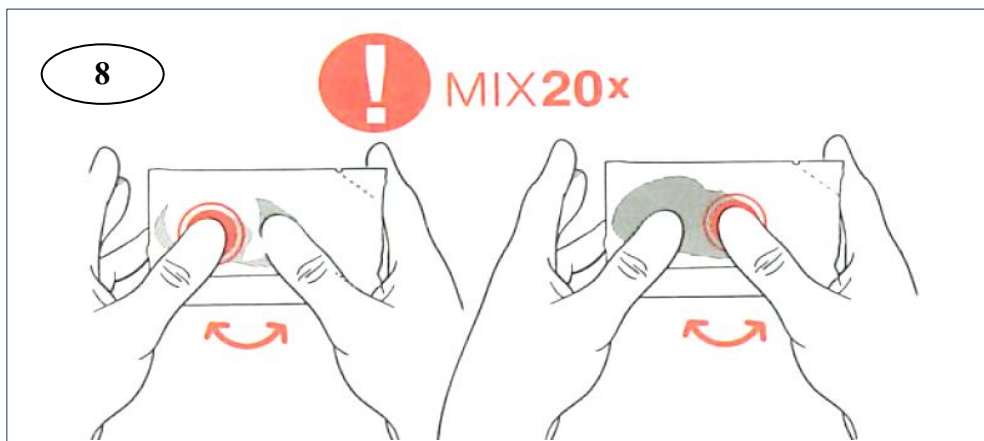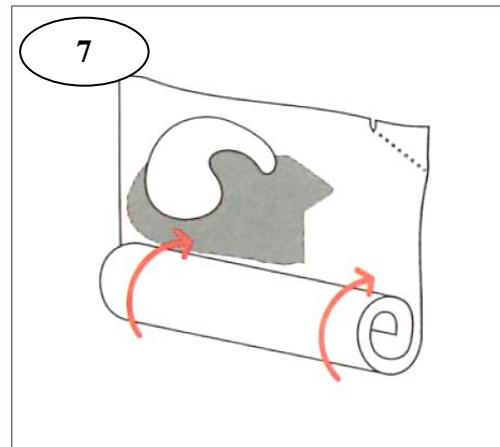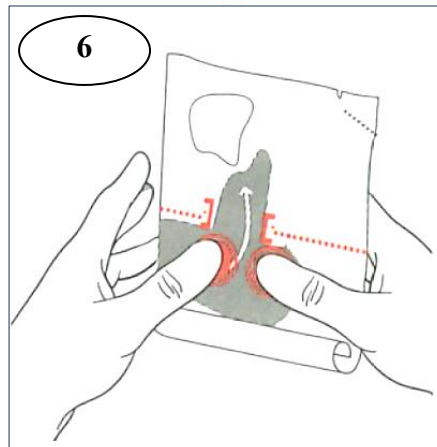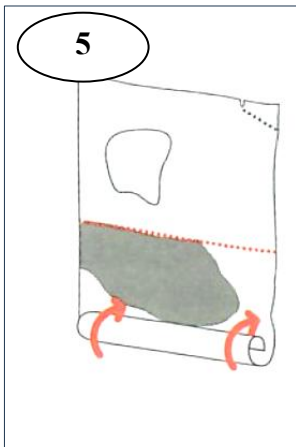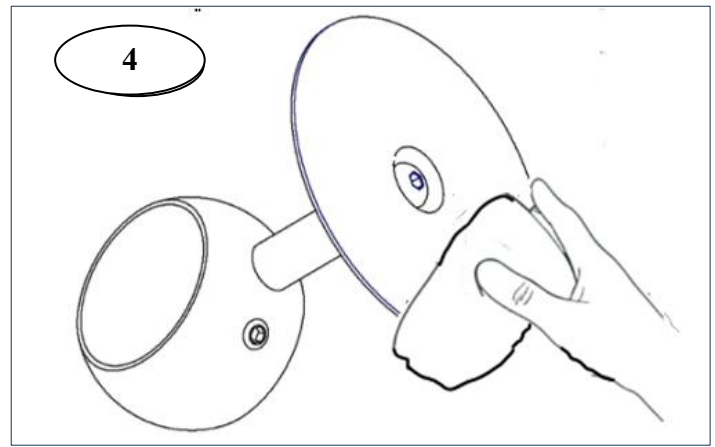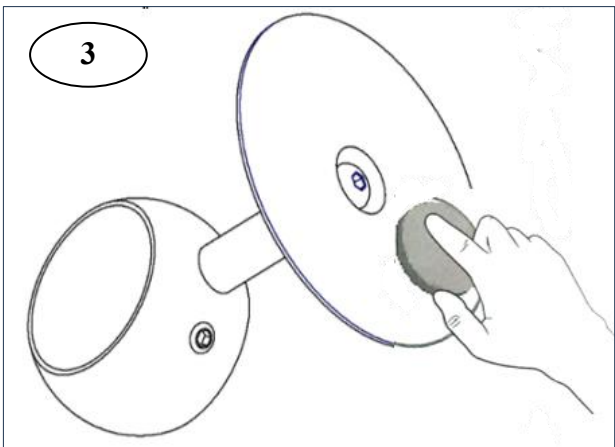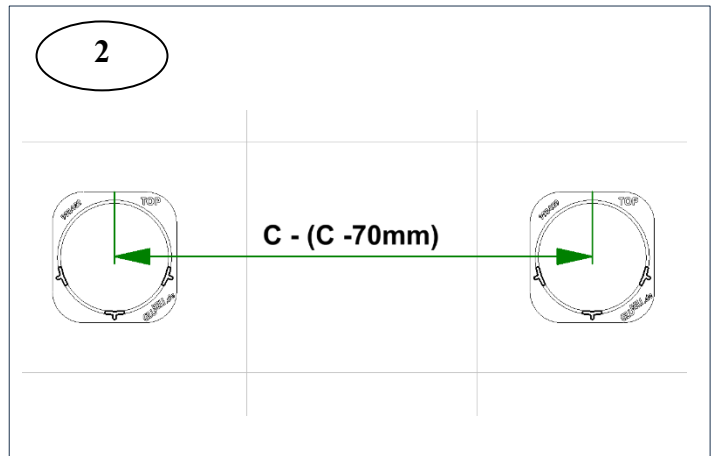

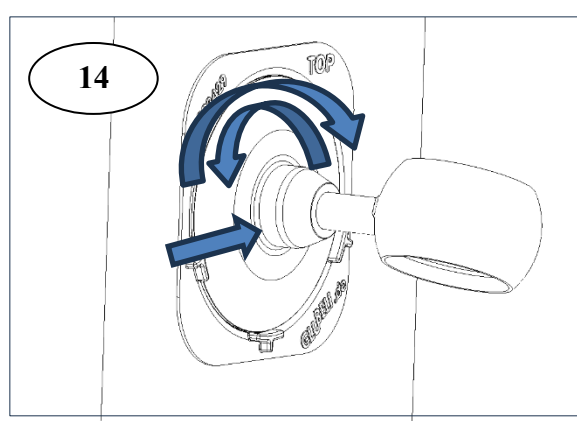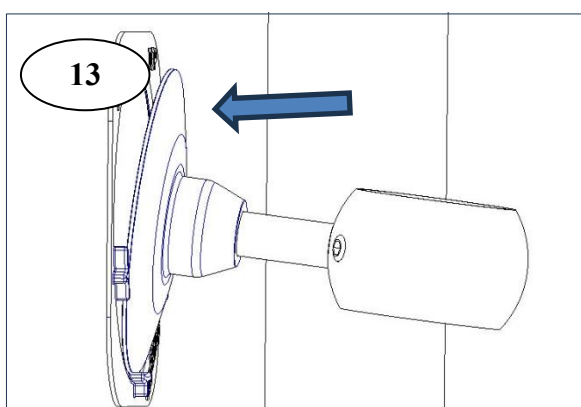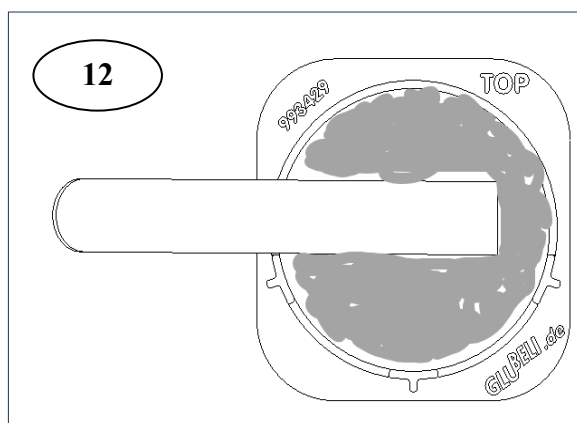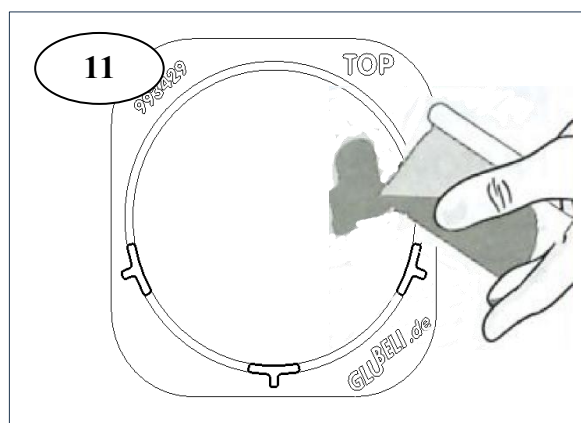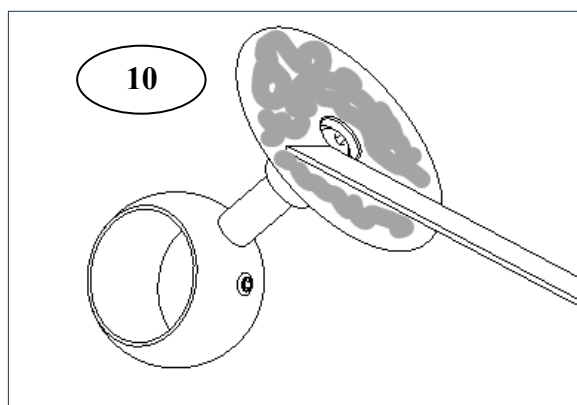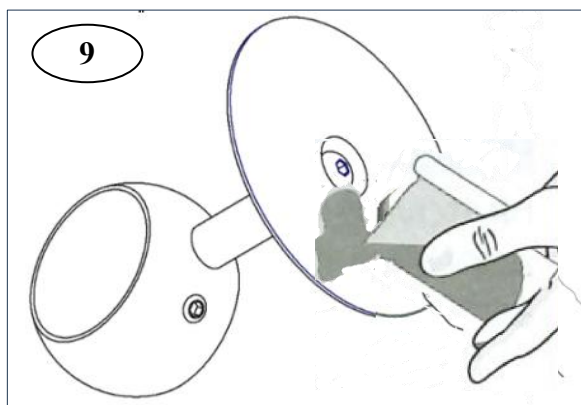

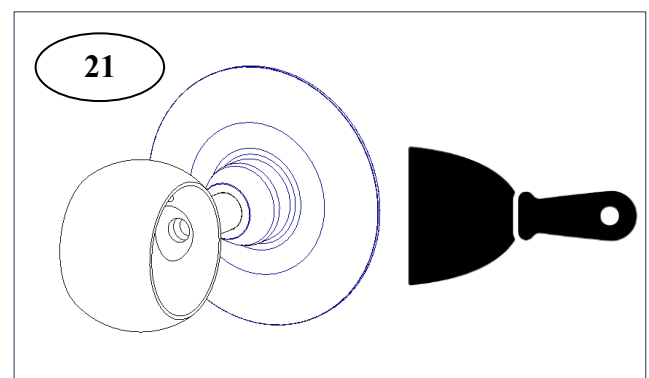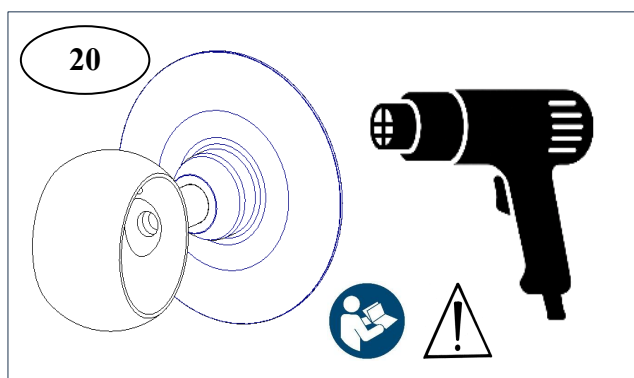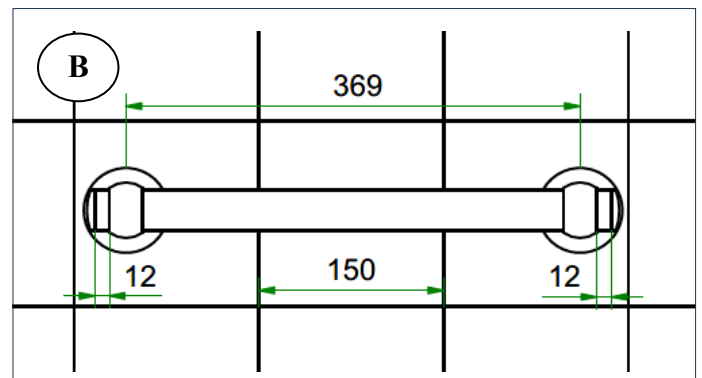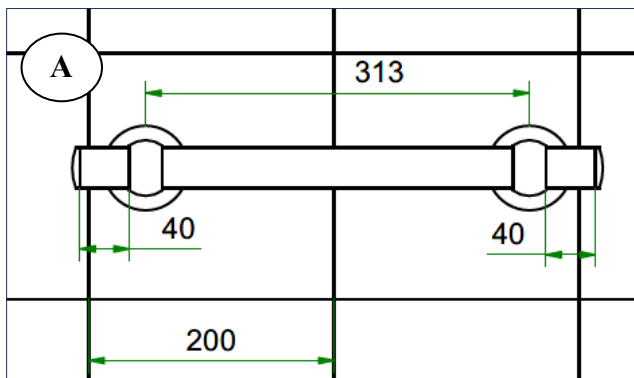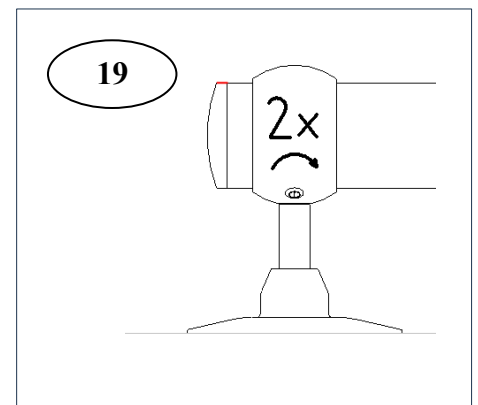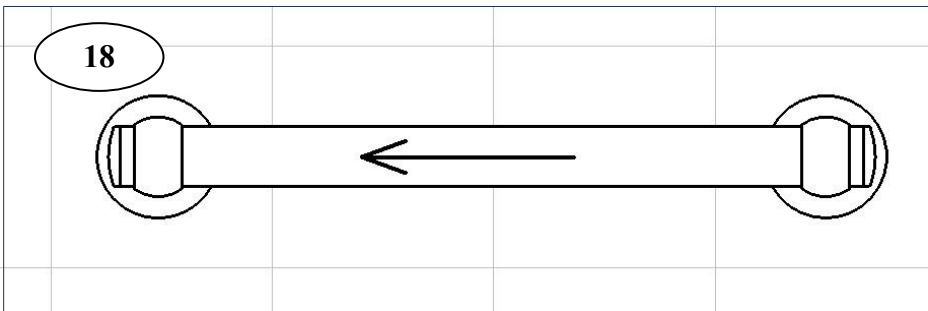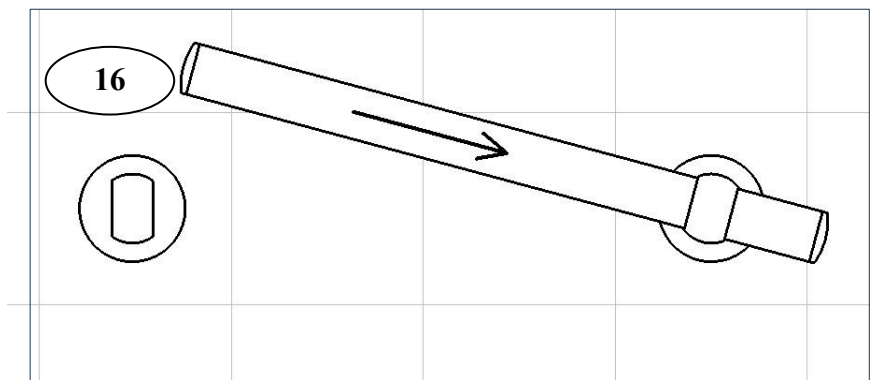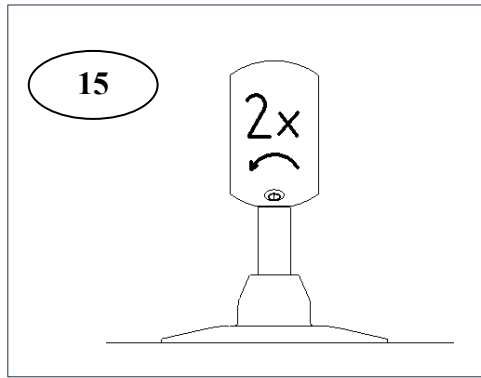

Weitere Informationen und Videos zu den Produkten finden Sie auf unserer Internetseite:

www.glubeli.de

Gebrauchsanweisung im Downloadbereich: www.mobeli.de/download-bereich

9. Lieferumfang:

A) 1x 

B) 2x 

C) 2x 

D) 1x 

E) 2x 

F) 1x 

G) 1x 

H) 1x 

I) 1x Checkliste

J) diese Gebrauchsanweisung

GLUBELI-Produkte



Eine Marke der



ROTH® GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
(+49) 07453/9381-0
info@roth.gmbh
www.glubeli.de

GLUBELI®
fix + fest